
(PCH16) – PAINEL PARA CÂNCER DE MAMA E OVÁRIO HEREDITÁRIOS

PAINEL PARA CÂNCER DE MAMA E OVÁRIO HEREDITÁRIOS

O resultado será liberado em formato PDF

Agrupamento de tubo: A12

MANUAL DE EXAMES:

Instruções material de coleta:

Sangue

Instruções de jejum:

- Jejum não obrigatório

Instruções de coleta:

- ATENÇÃO:

Obrigatório preencher e enviar "Questionário para testes genéticos" que se encontra disponível em Formulários de Exames Especializados no site do Lab Rede

Obrigatório enviar pedido médico. Enviar informação clínica detalhada

- Encaminhar amostra de sangue total (EDTA).

- Não manipular a amostra - enviar no próprio tubo de coleta - refrigerado.

Genes Analisados:

AKT1 (NM_005163), APC (NM_000038), ATM (NM_000051), BAP1 (NM_004656), BARD1 (NM_000465), BMPR1A (NM_004329), BRCA1 (NM_007294), BRCA2 (NM_000059), BRIP1 (NM_032043), CDH1 (NM_004360), CDK4 (NM_000075), CDKN2A (NM_000077), CHEK2 (NM_007194), EGFR (NM_005228), EPCAM (NM_002354), GREM1 (NM_013372), HOXB13 (NM_006361), MEN1 (NM_000244), MITF (NM_000248), MLH1 (NM_000249), MRE11 (NM_005591), MSH2 (NM_000251), MSH6 (NM_000179), MUTYH (NM_001048174), NBN (NM_002485), NF1 (NM_000267), PALB2 (NM_024675), PIK3CA (NM_006218), PMS2 (NM_000535), POLD1 (NM_001256849), POLE (NM_006231), PTEN (NM_000314), RAD50 (NM_005732), RAD51 (NM_002875), RAD51C (NM_058216), RAD51D (NM_002878), RB1 (NM_000321), RECQL (NM_002907), RET (NM_020975), SMAD4 (NM_005359), STK11 (NM_000455), TP53 (NM_000546), VHL (NM_000551), XRCC2 (NM_005431).

Instruções de encaminhamento:

4,0 mL de sangue total (EDTA)

Transporte: Refrigerado

Estabilidade: Refrigerado 05 dias

Instruções de interferentes:

- Uso de anticoagulante incorreto.

- Não enviar o questionário para testes genéticos preenchido e assinado.

Prazo de marcação: 30 dias úteis

AV. Raja Gabaglia, 182 • Gutierrez • Belo Horizonte • Minas Gerais

Fone: 55 31 3123.2858 • Fax: 55 31 3123.2878

www.labrede.com.br

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+